

COVID-19: PRAKTISCHER RATGEBER FÜR DIE AUSWAHL EINES ATEMSCUTZES

Auf der Grundlage einer allgemeinen Empfehlung von weltweiten Gesundheitsbehörden, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat AnsellCARES diesen praktischen Ratgeber für medizinisches Personal erstellt. Dieser soll sie bei der Auswahl des richtigen Atemschutzes für Tätigkeiten in Krankenhäusern, Kliniken, Pflegeeinrichtungen für Senioren oder Gemeinden unterstützen.

Dieser kurze Ratgeber erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte lesen Sie bezüglich eines Atemschutzes für Ihr spezielles Umfeld auch die Gebrauchsanleitung des Herstellers und die Verfahrensrichtlinien Ihrer Einrichtung.

	MEDIZINISCHE GESICHTSMASKEN		FILTERNDE ATEMSCUTZMASKEN		
	TYP II	TYP IIR	FFP1	FFP2	FFP3
Maskentypen	Schützt den Träger vor Infektionsträgern aus Nase und Mund.	Schützt den Träger vor Infektionsträgern aus Nase und Mund sowie vor Spritzern oder potenziell verunreinigten Flüssigkeiten.	Filtert Aerosole zu 80 %.	Filtert Aerosole zu 94 %. Die WHO empfiehlt den Maskentyp FFP2 oder höher, wenn ein filternder Atemschutz angezeigt ist.	Maximaler Schutz. Filtert Aerosole zu 99 %.
Verhindert die Verbreitung von Tröpfchen durch den Träger.	✓	✓	✓	✓	✓
Der Träger benötigt für den Schutz vor ausgeworfenen Spritzern eine hohe Filterleistung.		✓	✓	✓	✓
Ausgeworfene Partikel müssen eingedämmt werden, wenn eine Flüssigkeitsdichtigkeit erforderlich ist.		✓	✓	✓	✓
Der Träger benötigt einen eng sitzenden, abschließenden Atemschutz.			✓	✓	✓
Der Träger benötigt bei Verfahren, die Aerosole produzieren, einen eng sitzenden, abschließenden Atemschutz.				✓	✓*

DENKEN SIE DARAN:

- Befolgen Sie immer die von den örtlichen Gesundheitsbehörden vorgeschriebenen Verwendungs- und Auswahlrichtlinien für persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie.
- Befolgen Sie, zur Sicherstellung von PSA für die an vorderster Front kämpfenden medizinischen Mitarbeiter und für eine der Risikoebene entsprechenden verfügbaren Menge an Lagerbeständen, die empfohlenen Lagerungsrichtlinien für Masken. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) empfiehlt im Fall eines Mangels an filternden Atemschutzmasken das Tragen von medizinischen Masken.

* Das ECDC empfiehlt das Tragen einer FFP3-Atemschutzmaske bei allen Aerosole produzierenden Verfahren. ECDC-Technikbericht: „Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19“, Feb. 2020

COVID-19: PRAKTISCHER RATGEBER FÜR DIE AUSWAHL EINES ATEMSCHUTZES

Wichtige Empfehlung der WHO bezüglich des Tragens von Masken* in Verbindung mit dieser COVID-19-Pandemie

1

Das Tragen einer medizinischen Maske ist eine der Präventionsmaßnahmen, die eine Ausbreitung bestimmter viraler Lungenkrankheiten, einschließlich COVID-19, eindämmen kann.



2



Unabhängig vom Tragen einer Maske sind zur Vermeidung einer Übertragung von Mensch zu Mensch die **strikte Einhaltung einer Händehygiene** und anderer Maßnahmen der Infektionskontrolle unverzichtbar.

3



Medizinische Mitarbeiter müssen bei der Behandlung eines bestätigten COVID-19-Falles eine Partikelfilter-Atemschutzmaske zumindest des Typs **FFP2** gemäß der entsprechenden Norm der Europäischen Union (EU), eine vom NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) zertifizierte **N95**-Maske oder einen gleichwertigen Atemschutz tragen.

4



Befolgen Sie die **Entsorgungsrichtlinien**, einschließlich der Empfehlungen für das Wechseln, rückseitige Ausziehen und sofortige Entsorgen von Masken in geschlossene Behälter.

Für die Eindämmung einer weiteren Ausbreitung wird das Tragen von Masken in Außenbereichen beispielsweise für den öffentlichen Personenverkehr, Fahrgemeinschaften oder andere **dicht bevölkerte Bereiche empfohlen**.



*Zur Ansicht der WHO-Empfehlung bezüglich des Tragens von Masken in Verbindung mit COVID-19. [Pdf-Datei hier herunterladen](#)

Haftungsausschluss: Angesichts der Neuartigkeit dieses Coronavirus gelten die Empfehlungen aus den Quellenangaben ausschließlich als vorübergehende Empfehlungen auf der Grundlage des aktuellen Wissensstandes.